

Fórmula especialmente elaborada para isolamento dos trabalhos protéticos.

Composição:

- Alginato de Sódio
- Conservantes
- Água

Indicações:

- Para isolamento de gesso em trabalhos protéticos.

Características Técnicas:

- Para uso nas técnicas convencional e microondas;
- De fácil aplicação devido à sua viscosidade, permite fluidez e secagem rápida, com excelentes propriedades isolantes;
- A espessura do filme é adequada, não causando alterações dimensionais.

Apresentação:

Frascos de 120 ml, 250 ml, 500 ml e 1.000 ml.

Instruções de uso:

Agite antes de usar

Usar modelo de gesso previamente hidratado!

Na aplicação, utilize sempre um pincel limpo cobrindo toda a superfície a ser isolada, com cuidado para não atingir a parte posterior dos dentes. Quando fizer uso de filme separador na primeira prensagem, retire-o, recorte o excesso e aplique o Isolante ISOCRIL

Efetuar o isolamento com a mufla a 40°C.

Segurança:

- Não inflamável;
- Se houver irritação, procure um médico;
- Se houver contato com os olhos, lave com água em abundância;
- Se ingerido acidentalmente, beber água e não provocar vômito. Procurar auxílio médico.

Precauções:

- Manter o frasco fechado;
- Conservar ao abrigo de luz e calor;
- Manter fora do alcance das crianças;
- Evitar contato com a pele e com os olhos;
- Não contaminar o frasco com resíduos de gesso.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Hélio Wiebeck CRQ-IV 04302790

Produto declarado isento de cadastro pelo Ministério da Saúde.