

NEW PRINT

Material de Moldagem Odontológico Alginato para Impressão Dentária Tipo I Presa Rápida

Indicação de uso: O produto é indicado para a realização de impressões das arcadas dentárias. Indicado em moldagens para próteses fixas e removíveis, para ortodontia e modelos de estudo.

Advertências e Precauções:

- A inalação do pó pode ser prejudicial à saúde.
- Em caso de ingestão poderá ocasionar náuseas e vômitos.
- Uso exclusivo dos profissionais da odontologia.
- Produto médico de uso único.

Instruções de Uso:

- Utilizar os seguintes acessórios: Colher medidora para pó e frasco medidor de água graduado em 3 níveis. Uma medida de pó (1 colher = 10,5 g) e uma medida de água potável (1 nível = 18 ml) são suficientes para a moldagem de uma hemiarcada.
- Espatular o pó e a água até obter uma mistura homogênea.
- Inserir a moldeira com NEW PRINT em sua devida posição na boca, comprimindo-a ligeiramente.
- Fazer as correções musculares e manter a moldeira imóvel durante 1 minuto após o início da presa do material.
- Após a presa, remover e enxaguar em água corrente.
- Para se obter melhores resultados, recomenda-se vazar o gesso imediatamente após a moldagem.
- Tempo de trabalho/espatulação a 25°C: 35 segundos (\pm 05 seg.).
- Tempo de presa: 1:30 min. (\pm 20 seg.)

Sabor: Baunilha

Embalagem: Sachê 454g.

Propriedades:

- Dustless
- Altamente elástico
- Cumpre a ISO 21563
- Dosagem de acordo com as medidas de pó e água

COMPOSIÇÃO:

Diatomita, Polietilenoglicol, Sulfato de Cálcio, Alginato de Potássio, Dióxido de Silício, Dióxido de Titânio, Fluortitanato de Potássio, Sacarina Sódica, Óxido de Magnésio, Acetato de Clorexidina, Tetrapirofosfato de Sódio e Aroma artificial.

Armazenamento: Manter ao abrigo de calor e umidade. Ao abrir a embalagem, transferir o conteúdo para um recipiente hermético. Sempre fechar o recipiente imediatamente após o uso.

Manipulação: O produto deve ser manipulado em temperatura de aproximadamente 20°C - 25°C em umidade abaixo de 70%.

Validade: 02 anos após a data de fabricação.

Responsável Técnico: Luiz Paulo Ribeiro Junior - CRQ IV - 03251745

Cadastro ANVISA: N° 10216040034