

SOFT CONFORT DURA

Reembases para próteses totais e parciais e reembases em placas de bruxismo e aparelhos ortodônticos.

Composição:

Pó: Polímero Acrílico de Etilmetacrilato
Líquido: Monômero de Iso-Butilmetacrilato
Glaze: Líquido Acrílico de Etilmetacrilato

Indicação:

Material para reembase rígido de aplicação clínica, para uso exclusivo de profissionais de odontologia em aplicações recomendadas.

A resina Dura Soft Confort, diferentemente das resinas acrílicas autopolimerizáveis convencionais, não atinge as altas temperaturas que podem causar danos aos clientes. A Resina Dura Soft Confort atinge no máximo 37°C nos primeiros 10 minutos após a manipulação.

A durabilidade do reembasamento realizado com a Resina Soft Confort terá um tempo médio de 12 meses, podendo variar dependendo dos cuidados e hábitos dos pacientes.

Cores:

Incolor e Rosa Médio

Embalagem:

Kit com 40g de resina, 40mL de líquido, 8mL de Glaze e acessórios.

Instrução de uso:

1. Preparação da Prótese ou aparelho ortodôntico: Desgastar e deixar a superfície áspera na região da peça a ser recoberta. Limpar e secar bem a peça. Recobrir as superfícies labial e bucal com isolante. Não aplicar recobrimento a mais de 3mm da borda periférica. Proteger os dentes da prótese com isolante.

2. Preparação da DURA SOFT CONFORT: A relação de pó/líquido recomendada é de 15mL de pó para 5mL de líquido. Colocar o líquido em um recipiente de mistura e em seguida agregar o pó pouco a pouco. Mexer bem no máximo em 30 segundos, evitando a formação de bolhas.

3. Aplicação:

Em prótese total ou parcial:

Depois de 1 a 2 minutos, espalhar a resina DURA SOFT CONFORT sobre a área a ser recoberta.

Inserir a peça e pedir para o paciente que feche a boca suavemente até a oclusão.

Depois de 3 minutos, pedir para o paciente que mova os lábios e os maxilares a fim de obter uma adaptação muscular na periferia.

Retirar a peça e enxaguá-la com água fria e retirar o excesso de material.

Retornar a inserir a peça e pedir ao paciente que feche FIRMEMENTE a boca em oclusão e manter esta posição durante 5 minutos. Retirar a peça e novamente enxaguá-la com água fria.

Em aparelhos ortodônticos e placas de bruxismo:

Depois de 1 a 2 minutos, espalhar a resina DURA SOFT CONFORT sobre a área a ser recoberta.

Inserir a peça a realizar o reembase mantendo a peça em posição por 4 minutos.

Retirar a peça e enxaguá-la com água fria e retirar o excesso de material.

4. Acabamento: Após o término da polimerização (10 a 15 minutos) esculpir, eliminando o excesso.

O acabamento poderá ser realizado com brocas de Tungstênio.

Passe de duas a três camadas de Glaze para remover uma impermeabilização da peça e proteger a Resina Dura Soft Confort das pigmentações e odores.

No caso das próteses não passe o Glaze na resina termopolimerizável.

Benefícios do produto:

- A rigorosa seleção e testes de recebimento das matérias-primas combinados com os sucessivos testes durante todos os ciclos de fabricação, sob exigentes normas ISO, garantem os resultados especificados no produto final.
 - Utilização de Pigmentos Biocompatíveis, garantindo alta estabilidade das cores.
- SOFT CONFORT é um produto de fácil manuseio e aplicação, com resultados rápidos e precisos.
- Embalagem apropriada para a utilização dos dosadores fornecidos, que facilita a medição dos componentes em separado e a conservação do produto, até o final.



■ SOFT CONFORT DURA

Diferencial Competitivo:

- Matérias-primas selecionadas.
- Rigorosos controle de fabricação.
- Facilidade de manuseio e aplicação para a execução do trabalho.
- Embalagem prática.

Perguntas mais frequentes:

Como posso aumentar o tempo de manuseio do produto?

Para que se tenha mais tempo de manuseio do produto, em dias muito quentes, recomenda-se manter o líquido na geladeira antes do uso.

Quais são as causas de uma polimerização lenta?

A temperatura influi diretamente neste processo. Uma polimerização lenta é causada pela baixa temperatura ambiente. Já, se a temperatura ambiente for alta, o processo é acelerado.

Posso fazer um reembasamento direto?

Sim, a Resina SOFT CONFORT DURA é indicada para reembasamentos diretos.

Precauções:

- Somente para uso odontológicos;
- Seguir os procedimentos usuais para controle microbiológico, montagem, articulação e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.
- Líquido: Material muito inflamável, não tóxico (Ponto de Fulgor: 10°C/50°F);
- Resina: Pode formar misturas ar/ pó inflamáveis;

Como em todas as resinas acrílicas, recomenda-se o manuseio do produto em locais ventilados, utilizando-se luvas de nitrila e óculos de proteção;

O manuseio deste resina não é recomendável para gestante, lactantes e pessoas com sensibilidades reconhecidas para este tipo de produto;

- Pode causar irritação da pele em pessoas suscetíveis;
- Conservar ao abrigo da luz e calor;
- Não descartar os resíduos em esgostos e cursos d'água ou no lixo doméstico.

Observação:

Produtos que não são compatíveis com a resina/monômero: álcool, água, clorofórmio, acetona, vaselina e outros solventes orgânicos.

Responsável Técnico: Luiz Paulo Ribeiro Junior – CRQ IV - 03251745

Cadastro ANVISA:

Líquido: 10216040035

Pó: 10216040035

Glaze: 10216040032