

# ■ DENCRIGEL

Material de Moldagem Odontológico  
Alginato para Impressão Dentária  
Tipo II Presa Normal

## Indicação:

O produto é indicado para a realização de impressões das arcadas dentárias. Indicado em moldagens para próteses fixas e removíveis, para ortodontia e modelos de estudo.

## Sabor:

Tutti-frutti

## Embalagem:

Sachê 20,5g, Sachê 410g e Sachê 454g.

## Aplicação:

### Propriedades:

- Dustless
- Altamente elástico
- Cumpre a especificação nº 18 da ADA
- Dosagem de acordo com as medidas de pó e água
- Cromático - adquire cor rosa durante a espatulação e volta à cor branca após a total geleificação, o que indica o momento de sua remoção da boca.

### Modo de usar:

- Utilizar os seguintes acessórios: Colher medidora para pó e frasco medidor de água graduado em 3 níveis. Uma medida de pó (1 colher = 10,5g) e uma medida de água (1 nível = 20ml) são suficientes para a moldagem de uma hemiarcada.
- Espatular o pó e a água por 30 segundos até obter uma mistura homogênea.
- Inserir a moldeira com DENCRIGEL em sua devida posição na boca, comprimindo-a ligeiramente.
- Fazer as correções musculares e manter a moldeira imóvel durante 1 minuto após o início da presa do material.
- Após a presa, remover e enxaguar em água corrente.
- Para se obter melhores resultados, recomenda-se vazar o gesso imediatamente após a moldagem.
- Caso isto não seja possível, guardar a impressão envolta em toalha umedecida (jamais imersa em água).

### Cuidados especiais:

Contém sílica. A inalação do pó pode ser prejudicial à saúde. Manter ao abrigo de calor e umidade. As impressões devem ser sempre lavadas e desinfetadas, conforme recomendam a ADA, CDC e o OSHA. Uso exclusivo do cirurgião dentista.

### Químico Responsável:

Hélio Wiebeck - CRQ-IV 04302790

REGISTRO ANVISA Nº 10216040034

